


体質遺伝子検査キット用 検体（口腔粘膜）採取方法

ご注意

検査キットはご本人様以外は絶対にお手を触れないようお願いいたします。

- ① 口の中をすすぐために水で2～3回うがいをして、20分以上経過してから採取してください。
- ② 専用の綿棒で左右のほほの内側を、それぞれ10回程度こすってください。
綿棒は付属の試験管に入れてください。

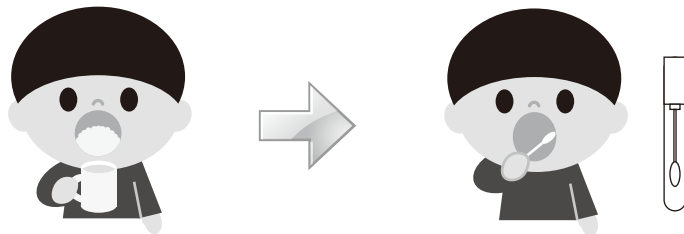

- ③ バーコードラベル2枚に氏名・性別・年齢を油性ペンもしくは黒または青のボールペンで記載してください。
※こちらの記載もご本人様にてお願いいたします。

80000000	
氏名	北海 太郎
性別	年齢
<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	36 歳

- ④ 2枚のラベルのうち、1枚を試験管に、もう一枚を依頼書1枚目の左上のバーコード貼付欄に貼ってください。
※こちらの貼付もご本人様にてお願いいたします。



バーコード貼付欄	
80000000	
氏名	北海 太郎
性別	年齢
<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	36 歳
体質遺伝子検査依頼書	
検査ご依頼者は太枠内のご記入をお願いいたします。	
検査依頼項目	<input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> □
検体の種類	

- ⑤ 試験管・依頼書・同意書を付属のビニール袋に入れ、医療機関もしくは指定機関にお渡してください。

