


# 体質遺伝子検査キット用 検体（口腔粘膜）採取方法

## ご注意

- ☆ 検査キットは品質保持のため、到着日より1ヶ月以内にご使用ください。
- ☆ 採取後の検体は、すみやかにご投函をお願いいたします。

**検査キットはご本人様以外は絶対にお手を触れないようお願いいたします。**

- ① 口の中をすすぐために水で2～3回うがいをして、20分以上経過してから採取してください。
- ② 専用の綿棒で左右のほほの内側を、それぞれ10回程度こすってください。  
綿棒は付属の試験管に入れてください。

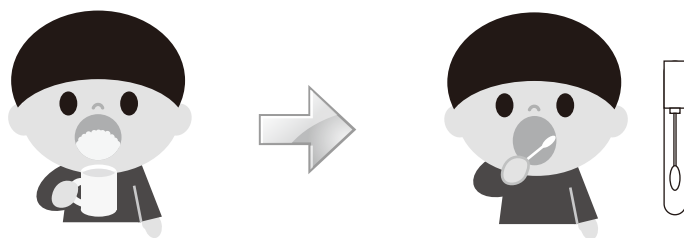

- ③ バーコードラベル2枚に氏名・性別・年齢を油性ペンもしくは黒または青のボールペンで記載してください。  
※こちらの記載もご本人様にてお願いいたします。

80000000	
氏名	北海 太郎
性別	年齢
<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	36 歳

- ④ 2枚のラベルのうち、1枚を試験管に、もう1枚を依頼書左上のバーコード貼付欄に貼ってください。  
※こちらの貼付もご本人様にてお願いいたします。



- ⑤ 試験管・依頼書・同意書を返信用封筒に入れて弊社へ郵送してください。  
※試験管は緩衝袋に入れてから同封してください。

